


## Easy Cuff

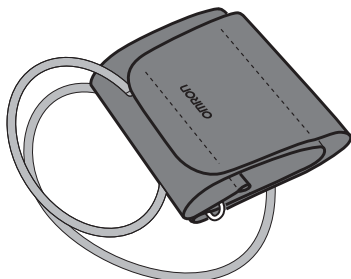

## HEM-RML31

### OMRON verenpainemittarin mansetti

• *Käyttöohjeet*

2 FI

Julkaisupäivä: 2022-12-14

# OMRON

## HEM-RML31





Kiitämme OMRON-mansetin HEM-RML31 ostamisesta. Olkavarren ympärystymitta on tätä mansettia käytettäessä 22–42 cm. Lisätietoja on verenpainemittarin alkuperäisissä käyttöohjeissa.

**Noudata näitä käyttöohjeita tarkkaan turvallisuutesi takia. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Saadaksesi tarkat tiedot verenpaineestasi, KESKUSTELE ASIASTA LÄÄKÄRISI KANSSA.**

**⚠ Huomio:** Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa lievän tai keskivaikean vamman käyttäjälle tai potilaalle tai mittarin tai muiden laitteiden vaurioitumisen, jos sitä ei vältetä.

- Tämä OMRON-mansetti voidaan liittää useisiin eri OMRON-verenpainemittareihin. Mansetti toimii vain HEM-RML31:n kanssa yhteensopivien OMRON-verenpainemittarien kanssa, kuten ilmaliitännän vieressä olevassa mansettitarrassa on mainittu.
- Tarkista mansetista, mitä liitintä siinä on käytettävä. Väärän liittimen käyttö voi johtaa ilmapuotoon ja virheellisiin lukemiin.
- Mansettia ei saa pestä eikä kastella märäksi.

### Käyttöohjeet

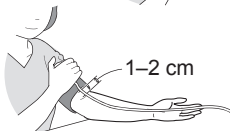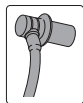

Poista tiukka vaatetus tai tiukasti käärityt hiha vasemman olkavarren ympäriltä.


Älä aseta mansettia paksujen vaatteiden päälle.

1. Työnnä ilmaletkun liitin huolellisesti ilmaliitännään.

Huomaa: Jos käytät vasemmalla olevan kuvan mukaista ilmaletkun liitintä, aseta se ilmaliitännään siten, että se napsahtaa.

2. Kierrä mansetti tukevasti vasemman olkavartesi ympärille.

Mansetin alareunan on oltava 1–2 cm kyynärtaipeen yläpuolella. Ilmaletku on käsivarren sisäsyryssä ja linjassa keskisormen kanssa.

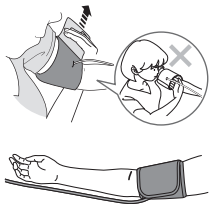

### 3. Sulje ja kiinnitä kangaskiinnikkeellä.

#### Mittaukset oikeasta olkavarresta

Ilmaletku on kyynärtaipeen sivulla.

Varo asettamasta käsivarttasi ilmaletkun päälle.

Huomaa: Oikean ja vasemman käsivarren verenpaine voi erota toisistaan, ja siksi myös verenpaineen mittaustulokset voivat olla erilaisia. OMRON suosittaa aina saman käden käyttämistä mittaukseen. Jos mittaustulokset poikkeavat toisistaan huomattavasti, kysy lääkäriltä, kumpaa kättä kannattaa käyttää mittaukseen.

- Puhdista mansetti pehmeällä ja kuivalla liinalla tai pehmeällä ja kostealla liinalla sekä neutraalilla saippualla.
- Älä käytä bensiiniä, ohennusaineita tai vastaavia liuottimia mansetin puhdistamiseen.
- Älä säilytä mansettia paikassa, jossa on erittäin kylmä tai kuuma, kosteaa, suoraa auringonvaloa, pölyä tai syövyttäviä höyryjä.
- Älä taivuta tai taita ilmaletkua liikaa.

## Ylläpito

#### Tekniset tiedot:

Tuotteen kuvaus	OMRON verenpainemittarin mansetti
Malli	HEM-RML31
Olkavarren ympärys	22–42 cm
Mansetin mitat	Korkeintaan 653 x 160 mm (auki taitettuna)
Mansetin painealue	Paine: 0–299 mmHg
Tarkkuus	Paine: $\pm 3$ mmHg
Luokitus	Luokka I
Käyttöolosuhteet	+10 – +40 °C (50–104 °F) 15–90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä) 700–1060 hPa

Varastointi-/kuljetusolosuhteet	-20 – +60 °C (-4–140 °F) 10–95 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä) 700–1060 hPa
Paino	Korkeintaan 187 g
Pakkauksen sisältö	Mansetti, käyttöohjeet, ilmaletkun liittimet
Kesto-aika (käyttöikä), takuu	1 vuosi



Ilmoita kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa sijaitset.

Tämä OMRON-tuote on valmistettu OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPANIN ehdottoman laatujärjestelmän piirissä.

#### Symbolien kuvaus

	CE-merkki
	UKCA-merkki
	Eränumero
	Yksilöity laitetunnus
	Lääkinnällinen laite
	Lämpötilarajoitus
	Kosteusrajoitus
	Ilmanpaineen rajoitus
	Laitteen kanssa yhteensopivien mansettien tunnistus
	Mansetin asetusilmaisina vasenta käsivartta varten
	Alueen osoitin ja olkavarren valtimon kohdistusilmaisina
	Mansetin merkki on asetettava valtimon yläpuolelle

<b>LATEX FREE</b>	Ei valmistettu luonnonkumilateksista
	Käsivarren ympärystöalueen ilmaisin oikean mansettikoon valintaa varten
	Viitekatologin numero
	Easy Cuff
	Intelli Wrap mansetti
	Comfort mansetti
 TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Teknologiasta vastaa OMRON Healthcare Japanissa
	Valmistuspäivämäärä
	Käyttäjän on tarkistettava tiedot käyttöohjeesta
	Olkavarren ympärys
<p>Tuotteen valmistuspäivämäärä sisältyy tuote- ja/tai myyntipakkauksessa olevaan eränumeroon: neljä ensimmäistä numeroa ilmoittavat valmistusvuoden, seuraavat kaksi valmistuskuukauden ja viimeiset kaksi valmistuspäivän.</p>	

<b>Valmistaja</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN			
<b>EU-edustaja</b> <table border="1" data-bbox="63 205 177 238"> <tr> <td data-bbox="63 205 114 238">EC</td> <td data-bbox="114 205 177 238">REP</td> </tr> </table>	EC	REP	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, ALANKOMAAT <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>	
EC	REP			
<b>Maahantuoja EU:ssa</b>				
<b>Tuotantolaitos</b>	<b>OMRON DALIAN Co., Ltd.</b> No.3 Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600 Liaoning, Kiinan kansantasavalta			
<b>Tytäryhtiöt</b>	Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastuuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>		
	<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /  OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>			

Valmistettu Kiinassa