

ES
NL
RU
AR

Nebulizador compresor

Compressor-vernevelaar / Ингалятор компрессорный
جهاز إستنشاق البخار المضغوط

C102 Total (NE-C102-E)

X102 Total (NE-C102-EO)




Manual de instrucciones

Gebruiksaanwijzing / Руководство по эксплуатации


ليل الإرشادات

All for Healthcare		IM2-NE-C102-E-02-11/2022 3A4509 rev.01
Fecha de publicación / Uitgiftedatum / Дата выпуска / تاريخ الإصدار / 2022-11-16		
Fabricante Fabrikant Производитель الشركة المصنعة	3A HEALTH CARE S.r.l. Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017 Lonato del Garda (BS) Italy	
Distributeur Distributeur Дистрибутор مكتبه التصنيع	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com	
Empresas filiales Dochterondernemingen Филиалы الشركات التابعة	Importador y responsable en el Reino Unido Importeur voor het Verenigd Koninkrijk en verantwoordelijke in het VK Импортер в Великобритании и ответственный лиц المورد المصرى للمملكة المتحدة والتعويض المسؤول في المملكة المتحدة OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 9DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors	
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors		
OMRON SANTE FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors		
Fabricado en Italia / Geproduceerd in Italie / Сделано в Италии / صنع في إيطاليا		


Conozca su unidad / Onderdelen van het apparaat / تعرف على الجهاز

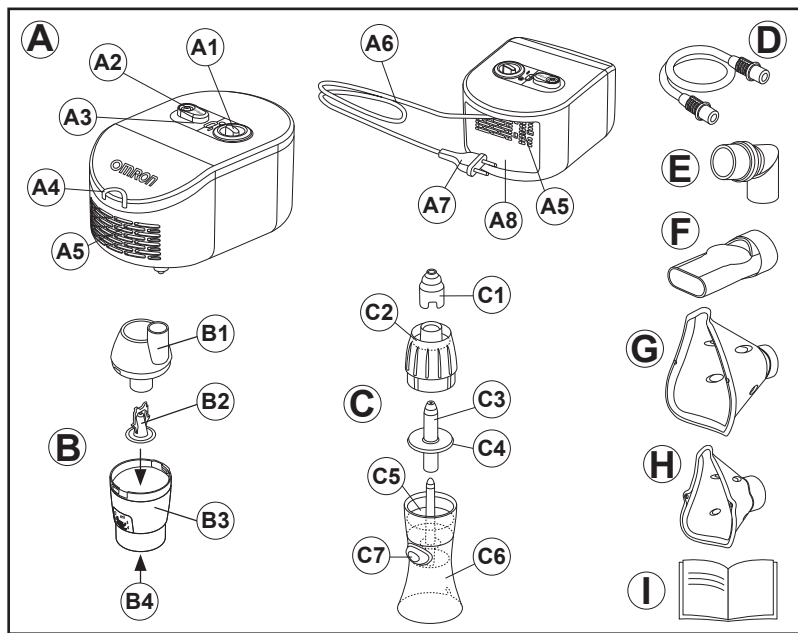

Instrucciones de uso / Gebruiksaanwijzing / كيفية الاستخدام

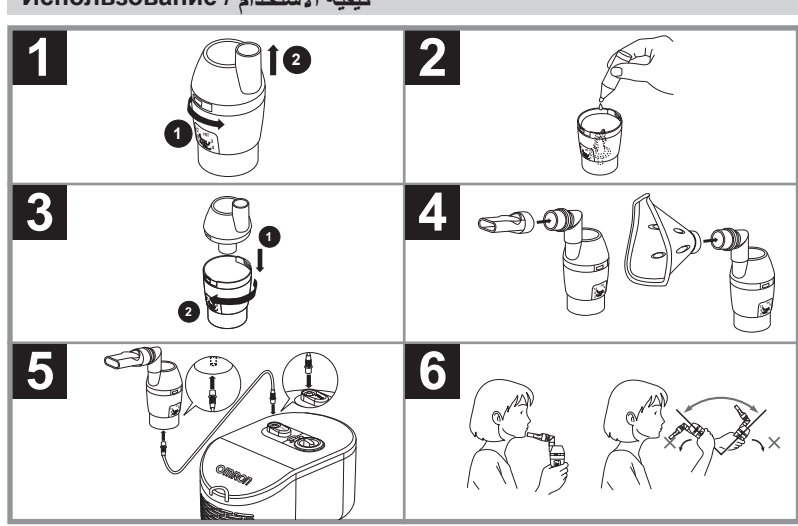

Preparación del lavado nasal / Voorbereiding van de neusdouche / تحضير ديش الأنف

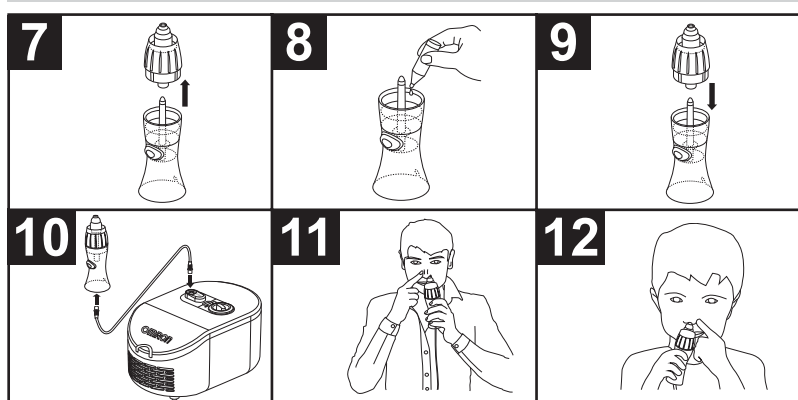

Sustitución del filtro de aire / Het luchtfilter vervangen / استبدال مرشح الهواء



Uso previsto

Objetivo médico
Este producto está destinado para su uso con medicamentos inhalados indicados en el tratamiento de trastornos respiratorios. El lavado nasal es un sistema de irrigación nasal que sirve para enjuagarse las cavidades nasales y rinofaríngeas. El uso previsto del compresor es para varios pacientes durante el lavado nasal, mientras que el uso previsto del kit nebulizador y sus accesorios es para un solo paciente.

Usuario al que está destinado

- Profesionales sanitarios legalmente titulados como médicos y enfermeros.
- Cuidadores o pacientes que sigan las instrucciones de médicos cualificados para prescribir el tratamiento en casa.
- El usuario también deberá tener conocimientos generales sobre el funcionamiento del kit C102 Total/ X102 Total y sobre el contenido de este manual de instrucciones.

Pacientes a los que está destinado este producto
Personas de cualquier edad que sufran trastornos respiratorios y requieran inhalación de medicación o enjuague de las cavidades nasales y rinofaríngeas.

Entorno
Este producto está destinado para su uso en un entorno doméstico típico.

Periodo de duración
Los periodos de duración serán los que aparecen a continuación siempre que el producto sea utilizado para nebulizar 3 veces al día durante 10 minutos cada vez, a temperatura ambiente (23 °C)

Compresor (unidad principal) 3 años
Tubo de aire - Kit nebulizador - Boquilla - Mascarilla para niños - Mascarilla para adultos - Adaptador - Dispositivo de lavado nasal: 1 año

Conector del tubo de aire 2 años
Cubierta del filtro de aire con filtro de aire 2 años
Soporte del kit nebulizador 2 años
Canal de ventilación 2 años
Ranuras de alimentación 2 años

Enchufe 2 años
Compartimento para el cable de alimentación 2 años

Conozca su unidad

- | | | |
|--|--|--|
| A Compresor (Unidad principal) | B Kit nebulizador | C4 Junta tórica |
| A1 Interruptor de encendido | B1 Parte superior de inhalación | C6 Depósito (15 ml máx.) |
| A2 Conector del tubo de aire | B2 Cabezal vaporizador | C8 Parte inferior |
| A3 Cubierta del filtro de aire con filtro de aire | B3 Depósito de medicación | C7 Botón |
| A4 Soporte del kit nebulizador | B4 Conector del tubo de aire | D Tubo de aire (PVC, 100 cm) |
| A5 Ranuras de ventilación | C Dispositivo de lavado nasal | E Adaptador |
| A6 Canal de alimentación | C1 Adaptador nasal | F Boquilla |
| A7 Enchufe | C2 Parte superior | G Mascarilla para adultos (PVC) |
| A8 Compartimento para el cable de alimentación | C3 Cánula | H Mascarilla para niños (PVC) |
| | | I Manual de instrucciones |

Funcionamiento del kit nebulizador

La medicación que se introduce a través del canal de medicación se mezcla con el aire comprimido que genera la bomba del compresor. La mezcla de aire comprimido y la medicación se transforma en pequeñas partículas y se pulveriza al entrar en contacto con el deflector en el cabezal vaporizador.

Cómo funciona el lavado nasal

La solución que se introduce a través del canal se mezcla con el aire comprimido que genera la bomba del compresor. El aire comprimido mezclado con la solución se transforma en partículas finas listas para la irrigación de las cavidades nasales y rinofaríngeas.

Instrucciones importantes sobre la seguridad (leer antes de usar)

- Advertencia:
 - Utilice el dispositivo solo como nebulizador para propósitos terapéuticos. Cualquier otro uso es impropio y puede ser peligroso. El fabricante no se hace responsable de un uso inadecuado.
 - No utilice el dispositivo en circuitos anestésicos ni de respiración por ventilación.
 - Quite el enchufe siempre después de usar el dispositivo y antes de limpiarlo. El dispositivo con las ranuras de ventilación cuando está en funcionamiento. El compresor podría calentarse y existe un posible riesgo de quemarse si se toca.
 - El compresor y el enchufe no son resistentes al agua. No vierta agua ni otros líquidos en estas piezas. Si se vierte líquido en estas piezas, quite el enchufe inmediatamente y limpie el líquido.
 - No intente reparar el dispositivo. Consulte la sección "Resolución de problemas".
 - Mantenga el dispositivo lejos del alcance de niños y bebés sin vigilancia adulta. El dispositivo contiene piezas pequeñas que podrían tragarse.
 - Preste especial atención cuando este dispositivo se utilice con o junto a niños o personas con capacidades limitadas.
 - Para obtener el tipo, la dosis y régimen de medicación, siga las indicaciones de su médico o especialista.
 - Este producto no deberá ser utilizado en pacientes en estado de inconsciencia o que no puedan respirar de forma espontánea.
 - Una vez terminado el tratamiento, desconecte el tubo de aire del kit nebulizador y del compresor.
 - Debido a su longitud, el cable de alimentación y el tubo de aire podrían constituir un riesgo de estrangulación.
 - asegúrese de usar el compresor en un lugar desde el que se pueda acceder fácilmente al enchufe durante el tratamiento.
 - Si sufre una reacción alérgica u otros problemas durante el uso del dispositivo, deje de usarlo de inmediato y consulte a su médico o especialista respiratorio.
 - Cuando use el dispositivo, asegúrese de que no haya teléfonos móviles ni otros dispositivos eléctricos que emitan campos electromagnéticos a menos de 30 cm. De lo contrario, puede producirse un deterioro del dispositivo o un rendimiento inferior.
 - No utilice el dispositivo de lavado nasal para ningún otro propósito excepto el mencionado como dispositivo de irrigación nasal.
 - El uso previsto del dispositivo de lavado nasal, el kit nebulizador y sus accesorios es para un solo paciente. No lo utilice con varios pacientes; utilice accesorios independientes para cada paciente.
 - Limpie las piezas después de cada uso y desinféctelas una vez a la semana durante un uso normal.

Instrucciones de uso

- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de apagado (O) y de que el enchufe está desconectado de la toma de corriente.
- Quite la parte superior de inhalación del depósito de medicación. **1**
- Gire la parte superior de inhalación en sentido antihorario.
- Retire la parte superior de inhalación del depósito de medicación.
- Verifique que el cabezal vaporizador (B2) se encuentra en el interior del depósito de medicación.
- Es posible que la cantidad correcta de medicación prescrita en el depósito de medicación. **2**
- Coloque de nuevo la parte superior de inhalación sobre el depósito de medicación. **3**
- Baje la parte superior de inhalación sobre el depósito de medicación.
- Gire la parte superior de inhalación en sentido horario.
- Acople firmemente el adaptador y la mascarilla o la boquilla al kit nebulizador. **4**
- Coloque el tubo de aire. Gire ligeramente el extremo del tubo de aire e introdúzalo con firmeza en el conector del tubo de aire. **5**
- Sujete el kit nebulizador tal y como se indica en la figura **6**. Siga las indicaciones de su médico o especialista respiratorio.

Precaución:
No incline el kit nebulizador con un ángulo superior a 30 grados en cualquier dirección. La medicación podría fluir hacia el interior de la boca o la nebulización podría no realizarse de forma efectiva.

- Conecte el enchufe en una toma de corriente.
- Nota: No instale el dispositivo en lugares donde no sea posible desconectar fácilmente el cable de alimentación.

- Mueva el interruptor a la posición de encendido (I). Una vez que el compresor se encienda, la nebulización comienza y se genera el aerosol. Inhale suavemente la medicación. Suelte el aire a través del kit nebulizador.
- Cuando haya finalizado el tratamiento, apague el compresor y desconecte el dispositivo de la toma de corriente. Enrole el cable y guárdelo en el compartimento de la parte posterior del dispositivo.

Preparación del dispositivo de lavado nasal

- Para añadir la solución al depósito de lavado nasal, levante la parte superior del depósito como se muestra en la figura **7**.
- Vierta la solución en el depósito (15 ml máx.). **8**
- Para cerrar el dispositivo de lavado nasal, vuelva a colocar la parte superior. **9**

- Conecte un extremo del tubo de aire al dispositivo de lavado nasal y el otro extremo al compresor. **10**
- Encienda el compresor para comenzar el tratamiento.

Funcionamiento del dispositivo de lavado nasal

Para encender el dispositivo de lavado nasal, pulse el botón y súetelo antes/durante la exhalación. Durante el tratamiento, cierre la fosa nasal a la que no se aplica el lavado nasal con un dedo. **11**

En el caso de niños o pacientes con capacidades limitadas, lave las dos fosas nasales de forma alterna cada 10-20 segundos. Tenga a mano un pañuelo para secar las fosas nasales en caso de salir mucosidad de la trampilla situada en la parte superior del dispositivo de lavado nasal. **12**

Cuando desaparezca el vapor del dispositivo de lavado nasal, el tratamiento habrá acabado. Una vez finalizado el tratamiento, tire la solución que quede en la parte superior y el depósito, desarme el dispositivo de lavado nasal en las cuatro piezas indicadas en la sección "Conozca su unidad" y límpielas según las instrucciones descritas a continuación.

Nota: NO INHALE NUNCA EN POSICIÓN HORIZONTAL. NO INCLINE EL DISPOSITIVO DE LAVADO NASAL MÁS DE 60°.

Limpieza y desinfección

Lávese las manos minuciosamente antes de limpiar y desinfectar las piezas del nebulizador. Limpie las piezas después de cada uso para eliminar los restos de medicación. Esto evitará que la nebulización sea ineficaz y reducirá el riesgo de infección.

- Limpieza del kit nebulizador, dispositivo de lavado nasal, mascarillas*, boquilla y adaptador:**
Desarme completamente el kit nebulizador y el dispositivo de lavado nasal. Lávelos con agua caliente y detergente suave y agua. Enjuágelos bien con agua del grifo caliente y limpia, elimine el exceso de agua dando leve golpecitos y déjelos secar en un lugar también limpio.
- Limpieza del compresor y el tubo de aire:**
En primer lugar, asegúrese de que el enchufe está desconectado de la toma de corriente. Limpie los cables con un paño suave humedecido con agua o con detergente neutro y suave.
- Desinfección del kit nebulizador, dispositivo de lavado nasal, mascarillas*, boquilla y adaptador:**
Desinfecte siempre las piezas antes de usar el producto por primera vez y si no se ha usado durante un periodo prolongado. Desinfecte las piezas una vez a la semana. Se espera que las piezas soporten aprox. 50 ciclos de desinfección. Si las piezas estuvieran muy manchadas, sustitúyalas por otras nuevas. El kit nebulizador, el dispositivo de lavado nasal, las mascarillas*, la boquilla y el adaptador se pueden desinfectar con un desinfectante químico como el etanol, el hipoclorito sódico (Milton), el amoníaco cuaternario (Svan), la clorhexidina (Hibitane) y el tensioactivo anfótero (Tego). Siga las instrucciones del producto y enjuague con agua tibia y limpia. Deje secar al aire. **Nota:** no limpiar nunca con benceno, disolvente ni productos químicos inflamables. *Las gomas elásticas (sin látex) no se pueden desinfectar. Retírelas para desinfectar las mascarillas.

- Hervido:** el kit nebulizador, el dispositivo de lavado nasal, la boquilla y el adaptador nunca se pueden desinfectar hirviéndolos al menos 5 minutos en abundante agua. Después de hervirlos, separe las piezas con cuidado, agítelas para eliminar el exceso de agua y deje que se sequen al aire en un entorno limpio. **Nota:** no hervir las mascarillas y el tubo de aire.

Sustitución del filtro de aire:
Si ha cambiado el color del filtro de aire o si se ha utilizado durante más de 70 aplicaciones, sustitúyalo por uno nuevo. Para comprar filtros, consulte el párrafo "Otras piezas de recambio/opcionales". Retire la cubierta del filtro de aire con un destornillador plano tal y como se muestra en la figura **13**, retire el filtro e inserte uno nuevo tal y como se muestra en la figura **14**. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire en su lugar.

Nota: no lave ni limpie el filtro de aire. Si el filtro de aire se humedece, sustitúyalo. Los filtros de aire húmedos pueden ocasionar obstrucciones.

Resolución de problemas

Si se encuentra con alguno de los problemas siguientes durante el uso del nebulizador, compruebe en primer lugar que no haya otros dispositivos eléctricos a menos de 30 cm. Si el problema persiste, consulte lo descrito a continuación.

- El dispositivo no se enciende**
 - Asegúrese de que el enchufe está bien conectado a la toma de corriente.
 - Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido (I).
- El dispositivo se enciende, pero no nebuliza**
 - Asegúrese de que el cabezal vaporizador está encajado en el kit nebulizador, o si está utilizando el dispositivo de lavado nasal, compruebe que esté bien montado.
 - Asegúrese de que el tubo de aire no está doblado ni aplastado.
 - Compruebe que el filtro de aire no está obstruido ni sucio. Sustitúyalo si fuera necesario.
 - Compruebe que se haya vertido suficiente medicación en el kit nebulizador.

El dispositivo deja de funcionar mientras se está usando
El sensor térmico ha apagado el dispositivo por un uso de los motivos siguientes:

- el dispositivo estaba siendo utilizado en entornos con una temperatura superior a los 40 °C;
- las ranuras de ventilación estaban cubiertas.

No intente reparar el dispositivo. No abra ni manipule el dispositivo. Ninguna de las piezas del dispositivo es apta para reparación por parte del usuario. Lleve el dispositivo a un establecimiento o distribuidor OMRON autorizado.

Le rogamos que informe al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido sobre cualquier incidente grave que se haya producido en relación con este dispositivo.

Datos técnicos

Categoría del producto: Equipo de aerosolterapia
Descripción del producto: Nebulizador compresor
Modelo (-código Int.): C102 Total (NE-C102-E) X102 Total (NE-C102-EO)

Tensión: 230 V a ~50 Hz, (fusible: T1.6AL250V)
Consumo de energía: 150 VA (75 W)
Modo de funcionamiento: Uso continuado
Temperatura/Humedad/ Presión atmosférica de funcionamiento: De +5 °C a +40 °C / De 15 al 85 % de humedad relativa / De 700 a 1060 hPa
Temperatura/Humedad/ presión atmosférica de conservación y transporte: De -20 °C a +60 °C / De 15 al 95 % de humedad relativa / De 500 a 1060 hPa
Peso: Aprox. 1,1 kg (solo el compresor)
Dimensiones: Aprox. 145 (anc.) × 124 (alt.) × 222 (prof.) mm
Clasificaciones: Tipo BF (partes en contacto); boquilla, mascarillas y IP21 (acceso protegido)

Contenido: Compresor, Kit nebulizador, Lavado nasal, Tubo de aire (PVC, 100 cm), Boquilla, Adaptador, Mascarilla ara adultos (PVC), Mascarilla para niños (PVC), Manual de instrucciones

SN = Número de serie			
MD = Producto sanitario			UDI = Identificador único del producto

Notas generales:

- La clasificación IP se refiere a los grados de protección proporcionados por contenedores de acuerdo con la norma IEC 60529. El compresor está protegido frente a la entrada de objetos sólidos extraños de 12 mm de diámetro o más, como, por ejemplo, los dedos, y frente a la entrada de gases de agua en dirección vertical que puedan causar problemas en el funcionamiento habitual.
- Especificaciones sujetas a modificaciones técnicas sin previo aviso.
- Es posible que el dispositivo no funcione si la temperatura y el voltaje son distintos a los mencionados en las especificaciones.
- Este dispositivo (compresor, kit nebulizador, tubo de aire, adaptador, boquilla, mascarilla para adultos y niños) cumple los requisitos de la norma europea EN ISO 27427:2019
- Equipo respiratorio y de anestesia. Sistemas de nebulización y sus componentes.
- El rendimiento del nebulizador podría cambiar dependiendo de la medicación, especialmente con suspensiones o con soluciones de gran viscosidad. Consulte la hoja de datos del proveedor de la medicación para obtener más detalles.
- La distribución del tamaño de las partículas y la salida de aerosol pueden variar por la combinación del producto, el medicamento y las condiciones ambientales, tales como la temperatura, la humedad y la presión atmosférica.
- Las definiciones para el rendimiento del nebulizador se basan en pruebas que utilizan patrones de ventilación para adultos y es probable que varíen respecto a las estadísticas para poblaciones pediátricas o infantiles.

Kit nebulizador:

Tipo de medicamento líquido:	Solución, suspensión
Cantidades de medicamento adecuadas:	2 ml mínimo - 12 ml máximo
Sonido: nivel de ruido (a 1 m de distancia):	Aprox. 57 dB
Tasa de nebulización (por pérdida de peso):	Aprox. 0,35 ml/min (NaCl 0,9 %)
Tasa de salida del aerosol**:	Aprox. 0,07 ml/min
Porcentaje de volumen de llenado en 1 minuto**:	Aprox. 2,3 %
Salida de aerosol**:	Aprox. 0,38 ml
Volumen residual**:	Aprox. 1,0 ml
Tamaño de partícula (MMAD)**:	Aprox. 3,5 µm
DEG**:	Aprox. 2,6
Fracción respirable < 5 µm**:	Aprox. 64 %
Fracción del aerosol < 2 µm**:	Aprox. 28 %
Fracción del aerosol de 2 µm a 5 µm**:	Aprox. 36 %
Fracción del aerosol > 5 µm**:	Aprox. 36 %

MMAD = Diámetro aerodinámico medio de masa
DEG = Desviación estándar geométrica
** 3 ml, 0,1 % de salbutamol en solución de NaCl 0,9 %

Lavado nasal:

Solución adecuada	
Cantidades:	Mínimo 3 ml - Máximo 15 ml
Tamaño de partícula:	90 % de partículas > 10 µm
Tasa de nebulización (por pérdida de peso):	más de 5 ml/min (NaCl 0,9 %)

Garantía

Gracias por adquirir un producto OMRON. Este producto se ha fabricado con gran esmero y utilizando materiales de alta calidad. Está diseñado para proporcionarle una total satisfacción, siempre que se manipule de forma correcta y se conserve según las indicaciones del manual de instrucciones. Este producto tiene la garantía de OMRON durante 3 años a partir de la fecha de compra. La fabricación, la mano de obra y los materiales de este producto están garantizados por OMRON. Durante el periodo de garantía, OMRON se hará cargo de reparar o sustituir el producto defectuoso o cualquier pieza defectuosa sin coste alguno, ni de piezas ni de mano de obra. La garantía no cubre lo siguiente:

- Gastos y riesgos del transporte.
- Gastos de reparación y defectos ocasionados durante una reparación realizada por personas no autorizadas.
- Revisiones periódicas y mantenimiento.
- Las averías o el desgaste de las piezas opcionales y otros accesorios que no sean el dispositivo principal, a menos que se haya indicado de forma explícita en la garantía.
- Gastos ordenados por el rechazo de una reclamación (éstos se cobrarán).
- Daños de cualquier tipo, incluidos los daños personales causados de forma accidental por un uso inadecuado.

 Si es necesario solicitar un servicio como parte de la garantía, acuda al establecimiento donde adquirió el producto o al distribuidor OMRON autorizado. Para obtener la dirección, consulte el embalaje/la documentación del producto o acuda a un establecimiento especializado. Si tiene problemas para encontrar el servicio de atención al cliente de OMRON, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Las reparaciones o sustituciones realizadas bajo la garantía no supondrán ninguna extensión o renovación del periodo de garantía. La garantía sólo será aplicable si el producto se devuelve completo junto con la factura original o el recibo proporcionado al cliente por el establecimiento. OMRON se reserva el derecho de no cumplir con el servicio de garantía si la información indicada no es lo suficientemente clara.

Descripción del producto:	Modelo
Conjunto de accesorios del nebulizador (Contenido: kit nebulizador, adaptador, boquilla, pieza nasal, mascarilla para adulto (PVC), mascarilla para niño (PVC), tubo de aire, filtro de aire)	NEB-ASKIT-11
Dispositivo de lavado nasal	NEB6014

Otras piezas de recambio/opcionales

Descripción del producto:	Modelo
Juego de filtro de aire (contiene: 3 piezas)	3AC408



Beoogd gebruik

Medische doeleinden
Dit product is bedoeld voor het inhaleren van medicijnen tegen luchtwegaandoeningen. De neusdouche is een nasaal irrigatiesysteem voor het spoelen van de neusholten en de rhinofaryngeale holten. De compresor is bedoeld voor hergebruik door meerdere patiënten, maar de neusdouche of vernevelset is bijbehorende hulpmiddelen zijn bedoeld voor hergebruik door één patiënt.

Doelgroep

- Wettelijk geplandeerd medisch deskundigen, zoals artsen, verpleegkundigen en therapeuten.
- Zorgverleners of patiënten onder begeleiding van een bevoegd medisch deskundige voor thuisbehandeling.

De gebruiker moet ook in staat zijn de algemene werking van de C102 Total/ X102 Total en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing te begrijpen.

Beoogde patiënten

Personen van alle leeftijden die lijzen aan luchtwegaandoeningen en bij wie vermeveling van medicijnen of spoeling van de neusholten of rhinofaryngeale holten nodig is.

Omgeving

Dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik. De gebruiksduur is als volgt, ervan uitgaande dat het product 3 keer per dag gedurende 10 minuten per keer bij kamertemperatuur (23 °C) wordt gebruikt voor verneveling. Compresor (hoofdeenheid): 5 jaar
Luchtslang - Vernevelset - Mondstuk - Masker voor kinderen - Masker voor volwassenen - Adapter- Neusdouche: 1 jaar
Luchtfilters: 70 behandelingen

De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomgeving. Frequent gebruik van het product kan de gebruiksduur verkorten.

Onderdelen van het apparaat

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| A Compresor (hoofdeenheid) | B Vernevelset | C4 O-ring |
| A1 Aan-uitschakelaar | B1 Vernevelkap | C6 Reservoir (max. 15 ml) |
| A2 aansluitstuk luchtslang | B2 Verstuurver | C8 Onderste gedeelte |
| A3 Afdekplaatje luchtfiter (bevt luchtfilter) | B3 Medijnreservoir | C7 Knop |
| A4 Houder vernevelset | B4 Aansluitstuk luchtslang | D Luchtslang (PVC, 100 cm) |
| A5 ventilatie-openingen | C Neusdouche | E Adapter |
| A6 Netsnoer | C1 Neusdaster | F Mondstuk |
| A7 Stekker | C2 Broekste gedeelte | G Masker voor volwassenen (PVC) |
| A8 Vak netsnoer | C3 Sproeiop | H Masker voor kinderen (PVC) |
| | | I Gebruiksaanwijzing |

Hoe werkt de vernevelset

Het medicijn dat door het medicijnkanaal wordt gepompt, wordt gemengd met samengeperste lucht die wordt gegenereerd door een compresorppomp. Het mengsel van samengeperste lucht en medicijn wordt omgezet in fijne deeltjes en verstuven, doordat het in contact komt met het keerschot op de verstuiver.

Werking van de neusdouche

De oplossing, die door het kanaal wordt gepompt, wordt gemengd met samengeperste lucht die wordt gegenereerd door een compresorppomp. De gecombineerde lucht vermengd met oplossing wordt omgezet in fijne deeltjes voor de irrigatie van de neusholten en rhinofaryngeale holten.

Belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid (lezen vóór gebruik)

⚠ Waarschuwing:

- Gebruik het apparaat uitsluitend als vernevelaar voor therapeutische doeleinden. Elk ander gebruik is ongepast en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor ongepast gebruik.
- Niet gebruiken in circuitstelsystemen voor anesthesie of beademing.
- Trek na gebruik en voor reiniging altijd de stekker uit het stopcontact.
- Dek de ventilatie-openingen niet af tijdens het gebruik. De compresor kan heet worden en bij aanraking is er mogelijk een risico op brandwonden.
- De compresor en de stekker zijn niet waterbestendig. Mora geen water of andere vloeistoffen op deze onderdelen. Als u toch vloeistof morst op deze onderdelen, trek u direct de stekker uit het stopcontact en veeg u de vloeistof weg.
- Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Raadpleeg paragraaf "Problemen oplossen".
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen die niet onder toezicht staan. Het apparaat bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.
- Zorg voor streng toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, voor of in de buurt van kinderen of personen met beperkingen.
- Volg voor type, dosis en gebruik van het medicijn de aanwijzingen van uw arts of ademhalingspecialist.
- Dit product mag niet worden gebruikt bij patiënten die bewusteloos zijn of niet spontaan ademen.
- Koppel na beëindiging van de behandeling de luchtslang los van de vernevelset en de compresor.
- Vanwege de lengte kunnen het snoer en de luchtslang wurgingsgevaar opleveren.
- 13. Zorg ervoor dat u de compresor gebruikt op een plek waar de stekker gemakkelijk bereikbaar is tijdens de behandeling.
- 14. Wanneer u tijdens het gebruik van dit apparaat binnen een bereik van 30 cm geen mobiele telefoons of andere elektrische apparaten aanwezig zijn die elektromagnetische velden afgeven. Dit kan ertoe leiden dat het instrument minder goed werkt.
- 15. Gebruik de neusdouche alleen zoals beoogd, als nasaal irrigatie-instrument.
- 17. De neusdouche, de vernevelset en bijbehorende hulpmiddelen zijn bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Niet gebruiken bij meerdere patiënten; gebruik afzonderlijke accessoires voor iedere patiënt.
- 18. Reinig de onderdelen na elk gebruik en desinfecteer de onderdelen eens per week bij normaal gebruik.

Gebruiksaanwijzing

- Zorg dat de aan-uitschakelaar uit (O)

