

HU

Kompresszoros inhalátor C28P (NE-C105-E) Használati útmutató

IM-NE-C105-E-HU-02-11/2022
Kiállítás dátuma: 2022-11-16

Tartalomjegyzék

Alkalmazási terület	3
Az inhalátor működése.....	4
Advanced Valve Technology (AVT) - továbbfejlesztett légzéskövető technológiával ellátott inhalátorkészlet.....	5
A készülék részei, tartozékai.....	6
Fontos biztonsági előírások	7
A használat módja	8
Tisztítás és fertőtlenítés	12
A levegőszűrő cseréje	13
Műszaki adatok	14
Hibaelhárítás	17
Garancia.....	18
Opcionális orvosi alkatrészek.....	19
További opcionális/cserealkatrészek.....	19

Köszönjük, hogy megvásárolta az OMRON C28P inhalátort. A készüléket légzőszerv-specialisták segítségével fejlesztettük ki az asztma, a COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease - krónikus obstruktív tüdőbetegség), a krónikus bronchitis, az allergiák és egyéb légzőszervi megbetegedések minél hatékonyabb kezelésére. Ez egy orvosi készülék. A berendezést csak kezelőorvosának és/vagy szakorvosának utasításai szerint használja.

Gyógyászati célok:

Ez a termék légzőszervi rendellenességek kezeléséhez szükséges gyógyszerek belélegzéséhez készült. A kompresszor több páciens kezelésére is használható, míg az inhalátorszettet és annak tartozékait csak egyetlen páciens használhatja.

Célzott felhasználók:

- Megfelelő képzettséggel rendelkező egészségügyi szakember, például orvos, ápoló és terapeuta vagy egészségügyi dolgozó, illetve maga a beteg egy egészségügyi szakember tanácsait követve.
- A felhasználónak képesnek kell lennie a C28P inhalátor általános működésének és jelen használati útmutató tartalmának megértésére.

Javasolt páciensek:

Kortól függetlenül olyan személyek esetében, akik légzőszervi rendellenességgel rendelkeznek, és belélegzés útján adagolt gyógyszeres kezelést igényelnek.

Környezet:

Ez a termék egészségügyi intézményben, például kórházban, klinikán és orvosi rendelőben vagy otthon történő használatra készült.

HU

Használhatóság időtartama:

A gyógyszer napi háromszori, egyenként 10 perces inhalálása mellett szobahőmérsékleten (23°C) az alábbi használhatósági időtartamok érvényesek.

A használhatóság időtartama függ a használat körülményeitől.


Kompresszor (készülék):	7,5 év
Hálózati kábel:	7,5 év
Inhalátorkészlet / Szájcsutora / Gyermekmaszk / Felnőtt maszk /	
Levegőcső / Kiegészítő csatlakozó:	1 év
Levegőszűrő:	60 nap

A termék gyakori használata lerövidítheti a használhatósági időtartamot.

Az inhalátor működése

A gyógyszercsatornába pumpált gyógyszer elvegyül a kompresszor által generált sűrített levegővel.

A sűrített levegőbe adagolt gyógyszer az elosztó gáton átjutva a porlasztófej segítségével apró részecskékké, aeroszollá átalakítva kerül befúvásra.

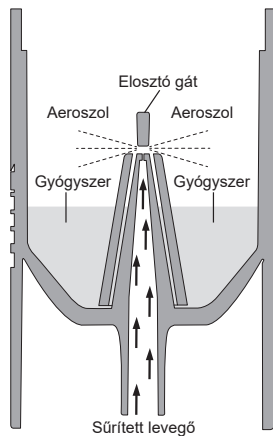

Advanced Valve Technology (AVT) - továbbfejlesztett légzéskövető technológiával ellátott inhalátorkészlet

A C28P inhalátor egy speciális, légzéskövető szeleprendszerrel van ellátva, mely képes a páciens által belélegzett gyógyszer mennyiségének maximalizálására. Az inhalálás folyamata közben optimalizálja a gyógyszer áramlását, és hatékonyan lecsökkenti a kilégzés okozta gyógyszervesztés mértékét.

Az aeroszol áramlásának légzéssel való szinkronizálása optimalizálja a belélegzett gyógyszer terápiás hatását.


Megjegyzés: Csak a szájszutora használata biztosítja az inhalátor szinkronizált működését!

Belégzési fázis

A belégzés közben a belégzési szelep (A) kinyílik és levegő áramlik az inhalátorba.

A levegő összekeveredik a keletkezett aeroszollal (B), melyet a szájszutorát használó páciens (C) belélegez.

Ebben a fázisban a kilégzési szelep (D) zárva marad, megakadályozva az aeroszol-pazarlást.

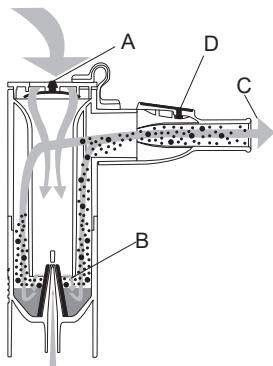


HU

Kilégzési fázis

A szájszutorán keresztül történő kilégzéskor az inhalátor belégzési szelepe (A) bezárul, így az aeroszol nem képes elhagyni az inhalátort.

A létrehozott aeroszol az inhalátorban marad, így felhasználható a következő belégzési fázisban.


A kilélegzett levegő a kilégzési szelepen (D) keresztül hagyja el a szájszutorát.

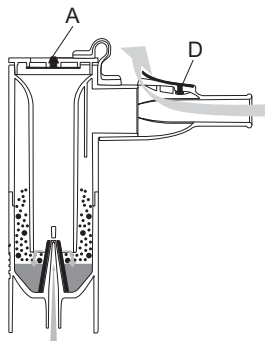


A készülék részei, tartozékai

Kompresszor (főegység)

Hátulnézet

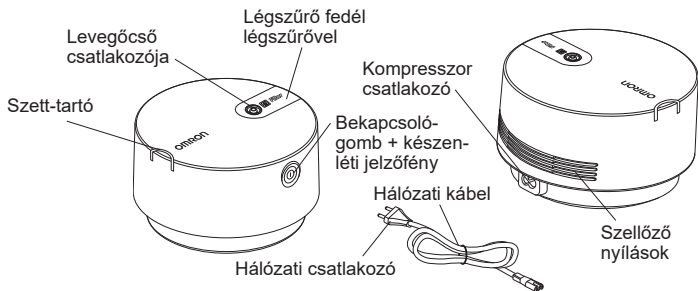


Inhalátor készlet

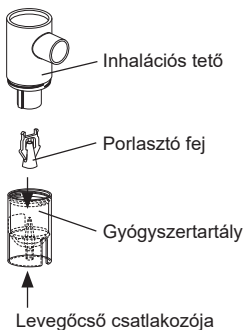

Levegőcső
(PVC, 150 cm)



Szájcsutoraszett

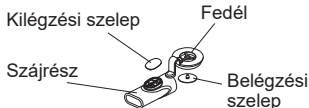

Felnőtt maszk
(PP+TPE)
elasztikus szalaggal



Kiegészítő csatlakozó gyermekmaszkhhoz (PP)



Gyermek maszk
(PP+TPE)
elasztikus szalaggal



Használati útmutató

Hordtáska

Tartalék levegőszűrő (5 db)

Fontos biztonsági előírások

 Használat előtt figyelmesen olvassa el az előírásokat.

Figyelmeztetés:

1. Az eszközt csak inhalátorként és terápiás célokra használja. Bármely más célú használat helytelen és veszélyes. A gyártó nem felelős a helytelen használatból eredő problémákért és károkért.
2. Ne használja a készüléket érzéstelenítésre vagy lélegeztetésre.
3. Használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
4. Használat közben ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
A kompresszor felmelegedhet és fennáll a veszélye annak, hogy hozzáérve égési sérülést szenvedhet.
5. A kompresszor és a hálózati csatlakozó nem vízálló. Vigyázzon, hogy ezekre ne cseppenjen víz vagy egyéb folyadék. Ha folyadék kerül ezekre a részekre, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és törölje le a folyadékot.
6. Ne próbálja megjavítani a készüléket. Lásd a „Hibaelhárítás” című fejezetet.
7. A készüléket tartsa csecsemőktől és gyermekektől elzárt helyen. A készülék egyes apró részeit a gyermekek lenyelhetik.
8. Fordítson különös figyelmet a készülék működtetésére akkor, ha gyermekek vagy fogyatékkal rendelkező személyek használják, illetve ha a készülék használata az ő közelükben történik.
9. A készülékhez használatos gyógyszerek típusával, dóziséval és minden egyéb részletével kapcsolatban kezelőorvosának vagy szakorvosának utasításait kövesse.
10. Esméletlen vagy nem spontán légzésű betegeknél a készülék nem használható.
11. Miután végzett a kezeléssel, ne felejtse el leválasztani a levegőcsövet az inhalátorszettől és a kompresszorról.
12. A hosszuk miatt a hálózati kábel és a levegőcső potenciális fulladásveszélyt jelenthet.
13. A kompresszort mindig olyan helyen használja, ahol a hálózati csatlakozó a kezelés során könnyedén elérhető.
14. Ha bármilyen allergiás reakciót vagy egyéb nehézséget észlel a használat során, azonnal hagyja abba a készülék használatát és beszéljen orvosával.
15. A készülék használata közben ügyeljen arra, hogy 30 cm-es távolságon belül ne legyen mobiltelefon vagy elektromágneses mezőt kibocsátó más elektromos eszköz. Ez a készülék teljesítményének romlásához vezethet.
16. Ne használjon gyógynövényekből készült olajokat, főzeteket, vagy tinktúrákat a kompresszoros inhalátorban.
17. Az inhalátorszettet és alkatrészeit csak egy páciens használja. Ne használja egyszerre több páciens; Minden páciens a saját tartozékait használja.
18. Minden használat után tisztítsa meg az alkatrészeket, és normál használat esetén heti egyszer fertőtlenítsen azokat.

A használat módja

1. Győződjön meg arról, hogy a bekapcsológomb KI állásban van (a tápfeszültség visszajelzője nem világít), és ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó ki legyen húzva a fali aljzatból.




2. Távolítsa el az inhalációs tetőt a gyógyszerartályról.
 - 1) Forgassa el az inhalációs tetőt az óramutató járásával ellenkező irányban.
 - 2) Emelje le az inhalációs tetőt a gyógyszerartályról.


3. A megfelelő mennyiségű előírt gyógyszert adagolja a gyógyszerartályba. Mindig tartsa be a minimum és a maximum töltési mennyiségekre vonatkozó utasításokat (lásd a Műszaki adatok című részt). Ha az inhalátorkészlet túl kevés vagy túl sok gyógyszert tartalmaz; akkor az inhaláció hatékonysága, így a gyógykezelése is, jelentős hátrányt szenvedhet.



4. Ellenőrizze, hogy a porlasztófej megfelelően illeszkedjen az inhalációs tetőhöz.

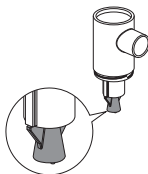


5. Tegye vissza az inhalációs tetőt a gyógyszertartályra.
- 1) Tegye rá az inhalációs tetőt a gyógyszertartályra.
 - 2) Forgassa el az inhalációs tetőt az óramutató járásával megegyező irányban.

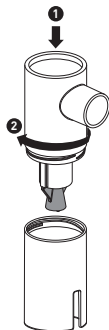


A szájcsontra használata

- 6a. Ellenőrizze a szelepek megfelelő csatlakoztatását.
Az alábbi ábra szerint járjon el.

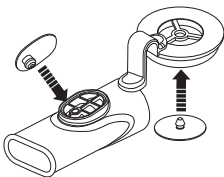

- 6b. Csatlakoztassa a szájcsontrát az inhalátorkészülethez, és nyomja rá a fedelet az inhalációs tetőre.

- 6c. Tartsa a szájcsontrát a szájban belégzés és kilégzés közben egyaránt, mivel a szelepes rendszer előnyeit csak így maximalizálhatja.

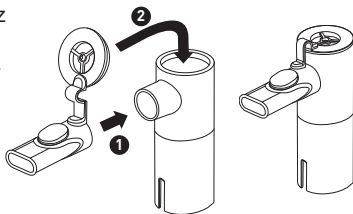


HU

Megjegyzés: Csecsemők vagy speciális igényű felnőttek a szájcsontra helyett használják a maszkot. Maszk használatakor ügyeljen arra, hogy az inhalációs tető fedele el legyen távolítva.


⚠ Vigyázat:

A szájcsontra inhalátorkészletből történő eltávolításakor fontos, hogy először vegye le a fedelet az inhalációs tetőről, majd ezt követően húzza ki. **Ne fordítsa meg ezt a sorrendet!**

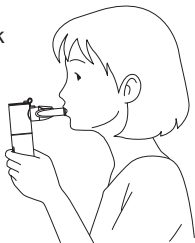

A felnőtt maszk használata

6d. Illessze a felnőtt maszkot az inhalátorkészlethez.

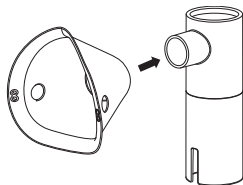


A gyermek maszk és a kiegészítő csatlakozó használata

6e. Rögzítse a gyermek maszkot a kiegészítő csatlakozóhoz, majd csatlakoztassa az inhalátorkészlethez.



7. Csatlakoztassa a levegőcsövet. A levegőcső csatlakozóját finoman elfordítva, egy erőteljes mozdulattal nyomja be a levegőcső csatlakozóba.

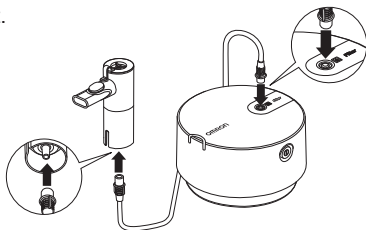

8. Tartsa az inhalátort a jobb oldali képen látható módon. Kövesse orvosát, szakorvosát utasításait.



⚠ Vigyázat:

Ne döntse az inhalátort 30 fokonál nagyobb mértékben egyik irányba sem. Az orvosság befolyhat a szájba vagy romolhat az inhalátor hatásköze.

9. Csatlakoztassa tápkábelt a kompresszorhoz, majd csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a fali csatlakozó aljzatba.

Megjegyzés: Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol nem tudja könnyen kihúzni a hálózati kábelt a konnektorból.

10. Kapcsolja be a kompresszort a bekapcsológomb megnyomásával; a kék színű készenléti jelzőfény világít. Ahogy a kompresszor elindul, az aeroszol folyamatosan keletkezik, kezdődhet az inhalálás. Finoman, a szájcsonton keresztül lélegezzen be és ki.
11. Ha a kezelés véget ért, nyomja meg ismét a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához. Húzza ki a kompresszort a fali csatlakozóaljzatból.

Tisztítás és fertőtlenítés

A tartozékok tisztításakor és fertőtlenítésekor tartsa be az alábbi utasításokat. Ha nem tartja be az utasításokat, az a termék károsodásához vezethet, rossz hatékonyságú porlasztást vagy fertőzést eredményezhet.

Az inhalátor részeinek tisztítása és fertőtlenítése előtt mindig körültekintően mosson kezet.

Használat előtt az alábbiak szerint tisztítsa meg az inhalátorkészletet és alkatrészeit, valamint tartozékokat (a maszkokat, a szájsutorát és a kiegészítő csatlakozót):

- a vásárlás utáni első használatkor (tisztítás és fertőtlenítés)
- ha a készüléket hosszabb ideig nem használta (tisztítás és fertőtlenítés)
- minden használat után (tisztítás)

Minden használat után tisztítsa meg az alkatrészeket, és normál használat esetén heti egyszer fertőtlenítse azokat.

● **Az inhalátorszett, maszkok, szájsutora és az adapter tisztítása:**

Szerelje szét teljesen az inhalátorszettet. Mossa le az alkatrészeket meleg vízben enyhe, semleges tisztítószerrel. Öblítse le alaposan tiszta, forró csapvízzel, óvatosan megütögetve távolítsa el róluk a felesleges vizet, és hagyja, hogy egy tiszta helyen, a levegőn megszáradjanak.

● **A kompresszor tisztítása:**

Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó ki van húzva a fali csatlakozóaljzatból.

Törölje tisztára egy puha, vízzel vagy enyhe, semleges tisztítószerrel átitatott ruhával.

● **Lecsapódott pára eltávolítása a levegőcsőből:**

Ha a levegőcsőben lecsapódott pára maradt, kövesse az alábbiakban szereplő eljárást. Ellenőrizze, hogy a levegőcső megfelelően csatlakoztatva van a kompresszorhoz. Húzza ki a levegőcsövet az inhalátorszettből. Kapcsolja be a kompresszort és szárítsa meg a levegőcsövet az átáramló levegővel.

● **Az inhalátorszett, maszkok, szájszutora és az adapter fertőtlenítése:**

Az alkatrészek heti egyszer fertőtlenítsse. Az alkatrészek élettartama várhatóan kb. 50 fertőtlenítési ciklus. Ha egy alkatrész nagyon beszennyeződött, akkor cserélje ki. Az inhalátorszett, a maszkok, a szájszutora és a kiegészítő csatlakozó vegyi anyagokkal, például etanollal, nátrium-hipoklorittal (Milton) fertőtleníthető, követve a termék használati útmutatóját és az adott részt a fertőtlenítés után tiszta meleg vízzel leöblítve. Hagyja a levegőn megszáradni.

Megjegyzés: A készüléket ne tisztítsa benzinnel, hígítóval vagy egyéb gyúlékony vegyszerrel. A (nem latex) elasztikus szalagok nem fertőtleníthetők. Távolítsa el ezeket a maszkok fertőtlenítésekor.

● **Főzés:**

Az inhalátorszett, a szájszutora, a maszkok és az adapter nagy mennyiségű vízben történő, legalább 5 percig tartó kifőzéssel is fertőtleníthető. Miután kifőzte az alkatrészeket, óvatosan vegye ki a vízből valamennyit, rázza le róluk a vizet, majd tiszta, pormentes környezetben szárítsa meg őket.

Megjegyzés: Ne főzze ki a levegőcsövet.

A levegőszűrő cseréje



Ha a levegőszűrő színe megváltozott, vagy több mint 60 napig volt használatban, cserélje ki egy újra. A szűrők vásárlásához lásd a - További opcionális/Cserealkatrészek című fejezetet.

Szerelje le a levegőszűrő fedelét. Emelje fel a levegőszűrő fedelét úgy, hogy az ábrán látható módon az ujját a horonyba akasztja.

Távolítsa el a szűrőt, és helyezze be az új szűrőt az ábra alapján.

Tegye a helyére a levegőszűrő fedelét.

Megjegyzés: Ne mossa vagy tisztítsa a levegőszűrőt. Ha a levegőszűrő vizes lesz, cserélje ki. A nedves levegőszűrők eltömődésekhez vezethetnek

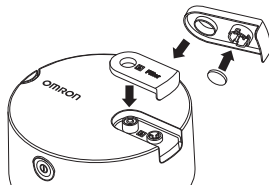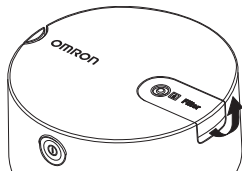

Műszaki adatok

Termékkategória:	Aeroszolterápiás berendezés
A termék adatai:	Kompresszoros inhalátor
Modell (kód): <input type="text" value="#"/>	C28P (NE-C105-E)
Besorolás:	230V ~50Hz
Áramfelvétel:	140VA (70W)
Használati mód:	Folyamatos használat
Működési hőmérséklet/ Páratartalom/Légnyomás:	+5°C és +40°C között / 15% és 85% közötti relatív páratartalom / 700 hPa és 1060 hPa
Tárolási és szállítási hőmérséklet/Páratartalom/ Légnyomás:	-20°C és +60°C között / 5% és 95% közötti relatív páratartalom / 500 hPa és 1060 hPa
Besorolások:	BF típus (érintkező rész): Szájcsutora és maszkok II. osztály (Áramütés elleni védelem)
IP besorolás:	IP21
A kompresszor súlya:	Kb. 1,3 kg (csak a kompresszor)
A kompresszor mérete:	Kb. Ø 180 × 104 (magasság) mm
Tartozékok:	Kompresszor (főegység), hálózati kábel EU csatlakozóval, inhalátorkészlet, levegőcső (150 cm), szájcsutoraszett, kiegészítő csatlakozó, felnőtts maszk, gyermekmaszk, hordozótáska, 5 db. Tartalék levegőszűrő, Használati útmutató
A gyógyszeres folyadék típusa:	Oldat, szuszpenzió
Hozzávetőleges gyógyszer mennyiség:	Minimum 2 ml - maximum 10 ml
Hang: Zajszint (1 m-es távolságban)	Kb. 55 dB
Aeroszol kibocsátási sebesség**:	Kb. 0,12 ml/perc

A töltési térfogat százalékában Kb. 4 %
kifejezett 1 perc alatti
kibocsátási mennyiség**:

Aeroszolkibocsátás**: Kb. 0,9 ml

Maradék térfogat**: Kb. 1,1 ml

Részecskeméret (MMAD)**: Kb. 3,5 μm

GSD**: Kb. 2,6

Belélegezhető frakció < 5 μm ** : Kb. 64 %

Aeroszol frakció < 2 μm ** : Kb. 28 %

Aeroszol frakció
2 μm és 5 μm között**:

Aeroszol frakció > 5 μm ** : Kb. 36 %


MMAD = átlagos szemcsenagyság

GSD = Geometric standard deviation (Geometriai szórás)







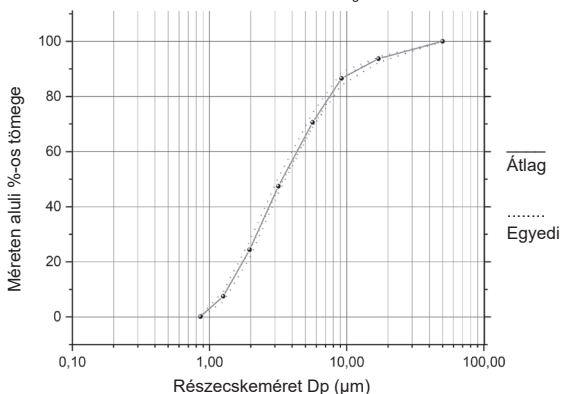








** 3ml, 0,1% Szalbutamol 0,9%-os NaCl oldatban.

Kaszád-impaktoros méréssel meghatározott részecskeméret

A méreten aluli szalbutamol részecsketömeg kumulatív %-a



HU

Szimbólumok			
	Nézzen utána a használati útmutatóban		Használati páratartalom
	A felhasználó számára fontos a használati utasítás végigolvasása		Használati atmoszférikus nyomás
	Type BF - Érintkező rész Áramütés (áramszivárgás) elleni védelem szintje		Hőmérséklet korlátozás
	II. osztály Áramütés elleni védelem		Főkapcsoló ON/OFF (nyomásra működő)
IP XX	IEC 60529 szabvány által biztosított védelem a környezeti behatások ellen		Váltakozó áram
	CE jelölés		Orvostechnikai eszköz
	Gyártási szám		Gyártás dátuma
	Sorozatszám		Egyedi eszközazonosító

Általános megjegyzések:

- Az IP védelem osztályozása a villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védelem fokozatokat jelöli az IEC 60529 szabványban leírtaknak megfelelően. A kompresszor védett a 12 mm átmérőjű vagy annál nagyobb szilárd tárgyak (például emberi ujj) behatásai, és a függőlegesen érkező vízcseppekkel szemben, ami a normál működésben zavart okozhat.
- A műszaki adatok külön értesítés nélkül változhatnak.
- A specifikációban megadottól eltérő hőmérsékleti viszonyok és feszültség esetén a készülék nem biztos, hogy működni fog.
- Ez a termék (a kompresszor, az inhalátorszett, a levegőcső, a szájsutoraszett, a gyermek maszkhoz tartozó adapter, és a felnőt, valamint a gyermek maszk) megfelel az EN ISO 27427:2019 Altató- és lélegeztetőkészülékek - Porlasztórendszerek és alkatrészük európai szabvány előírásainak.

- Az inhalátor teljesítménye a gyógyszerek egyes jellemzőitől függhet, eltérő például szuszpenzió és sűrű oldatok esetében. További részletekért lásd a gyógyszer szállító adatlapját.
- A részecskeméret eloszlása és az aeroszol kibocsátása a terméktől, a gyógyszertől és a környezeti körülményektől, például a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a légköri nyomástól függően eltérő lehet.
- Az inhalátor teljesítményére vonatkozó adatok felnőttek légzésmintázatát vizsgáló teszteken alapulnak, ami nagy valószínűséggel eltér a gyermekek vagy csecsemők esetében várható értékektől.

Hibaelhárítás

Ha az alábbi problémák bármelyike fellép a használat során, ellenőrizze, hogy nincs-e más elektromos eszköz 30 cm-nél közelebb a készülékhez. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor tanulmányozza az alábbi táblázatot.

A készülék nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e bedugva a fali aljzatba, és hogy a hálózati kábel megfelelően van-e bedugva a kompresszor csatlakozójába.
- Ellenőrizze, hogy a bekapcsológomb bekapcsolt állapotban legyen.

A készülék bekapcsol, de az inhalátor nem működik

- Ügyeljen arra, hogy a porlasztófej megfelelően illeszkedjen az inhalátorkészlet inhalációs tetejéhez.
- Ellenőrizze, hogy a levegőcső nincs-e összenyomva vagy megtörve.
- Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nincs-e eltakarva vagy eltömődve. Szükség esetén cserélje.
- Ellenőrizze, hogy elegendő mennyiségű gyógyszert rakott-e az inhalátorszettbe.

A készülék működés közben hirtelen leáll.

- A hőérzékelő lekapcsolta a készüléket az alábbi okok egyike miatt:
 - 40°C-nál magasabb hőmérsékletű környezetben használta a készüléket;
 - a szellőzőnyílások el voltak takarva.

Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ne nyissa ki és/vagy ne módosítsa a készüléket. A készülék egyetlen alkatrésze sem javítható a felhasználó által. Vigye vissza a készüléket egy hivatalos OMRON viszonteladóhoz vagy a márkaképviselethez.

Kérjük, jelentse a gyártónak és a lakhelye alapján illetékes tagállam hatóságainak az összes olyan súlyos balesetet, amely az eszközzel kapcsolatban előfordult.

Garancia

Köszönjük, hogy OMRON terméket vásárolt. Ez a termék magas minőségű anyagokból készült és a gyártása során is nagyfokú gondossággal jártunk el. Úgy terveztük a terméket, hogy a lehető legkényelmesebben használhassa azt, ha betartja a használati útmutatóban leírt működtetési és karbantartási szabályokat. Erre a termékre az OMRON a vásárlást követő 3 évig vállal garanciát. A termék megfelelő felépítése, megmunkálása és az anyagok az OMRON által garantáltak. A garanciális időn belül az OMRON munkadíj és anyagköltség felszámolása nélkül megjavítja vagy kicseréli a tönkrement terméket vagy annak bármely meghibásodott alkatrészét. A garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

- a. Szállítási költségek és a szállításból eredő kockázatok.
- b. Jogosulatlan személy által végzett javításból eredő költségek és problémák.
- c. Rendszeres ellenőrzés és karbantartás.
- d. A készüléken kívüli kiegészítők vagy egyéb tartozékok meghibásodása vagy egyéb problémái, kivéve, ha azt a garancia külön is jelzi.
- e. El nem fogadott reklamáció költségei (melyekért fizetni kell).
- f. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű, akár személyi kár.

Ha igénybe kell vennie a garanciát, kérjük keresse fel azt a viszonteladót, akinél a terméket vette, vagy egy hivatalos OMRON viszonteladót. A címet a termék csomagolásán vagy a dokumentációban találja vagy kérdezze meg a viszonteladót.

A garancia keretében végzett javítás vagy csere nem jelenti a jótállási idő meghosszabbítását vagy megújítását.

A garancia csak akkor érvényesíthető, ha a terméket hiánytalanul visszajuttatja az eredeti számlával vagy a kereskedőtől kapott nyugtával együtt. Az OMRON fenntartja magának a jogot a garancia szolgáltatás megtagadására, ha a megadott adatok nem egyértelműek.

Opcionális orvosi alkatrészek

Termék leírása	Modell
Inhalátor készlet	NEB6026
Levegőcső	NEB6016
Szájcsutoraszett (Tartozékok: Szájcsutora fedéllel, Kilégzési szelep, Belégzési szelep)	NEB6027
Gyermekmaszk (elasztikus szalaggal)	NEB6028
Felnőtt maszk (elasztikus szalaggal)	NEB6029
Kiegészítő csatlakozó gyermekmaszkhoz	NEB6030
Orrzuhany	NEB6014

További opcionális/cserealkatrészek

Termék leírása	Modell
Hálózati kábel EU csatlakozóval	3AC459
Hálózati kábel UK csatlakozóval	3AC460
Légszűrő szett (tartozékok: 5 darab)	3AC458

HU

Fontos információk az elektromágneses kompatibilitással (EMC) kapcsolatban

Ez a 3A HEALTH CARE S.r.l. által gyártott készülék megfelel az Elektromágneses kompatibilitásról (EMC) szóló EN60601-1-2:2015 szabványnak. Ezzel az EMC szabvánnyal kapcsolatos további dokumentációk az OMRON HEALTHCARE EUROPE használati útmutatóban található címén vagy a www.omron-healthcare.com webhelyen érhetők el.



ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁS (2012/19/EU-WEEE irányelv)

Ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, a feleslegessé vált készüléket vagy alkatrészeit az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőpontokon kell leadni. További információ az önkormányzatoknál, az önkormányzatok hulladékártalmatlanítással foglalkozó szervezeteinél, vagy a terméket árusító viszonteladóknál érhető el.

Gyártó 	3A HEALTH CARE S.r.l. Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017 Lonato del Garda (BS), Olaszország
Márkakép- viselet 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA www.omron-healthcare.com
Leányvállalatok	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors

Származási ország: Olaszország